

OVAKO RADI VAŠ INHALATOR ELLIPTA.

1 Usni nastavak Poklopac



OTVORITI

Otvorite inhalator povlačenjem poklopca prema dolje sve dok ne začujete **škljocaj**. Brojač doza sada pokazuje jednu jedinicu manje i vaš inhalator spremjan je za uporabu.



INHALIRATI

Izdahnite bez naprezanja što je duže moguće. Zatim uhvatite usni nastavak usnama – **nemojte prekriti otvore za zrak** – te duboko, dugo i ravnomjerno udahnite putem inhalatora. Zadržite dah 3 do 4 sekunde te nakon toga izdahnite. **Važno: Nemojte izdahnuti u inhalator.**



ZATVORITI

Vratite poklopac na svoje mjesto i isperite usta vodom.

OVAKO RADI VAŠ INHALATOR ELLIPTA.

1 Usni nastavak Poklopac



OTVORITI

Otvorite inhalator povlačenjem poklopca prema dolje sve dok ne začujete **škljocaj**. Brojač doza sada pokazuje jednu jedinicu manje i vaš inhalator spremjan je za uporabu.



INHALIRATI

Izdahnite bez naprezanja što je duže moguće. Zatim uhvatite usni nastavak usnama – **nemojte prekriti otvore za zrak** – te duboko, dugo i ravnomjerno udahnite putem inhalatora. Zadržite dah 3 do 4 sekunde te nakon toga izdahnite. **Važno: Nemojte izdahnuti u inhalator.**



ZATVORITI

Vratite poklopac na svoje mjesto i isperite usta vodom.

ELLİPTA VİDEO ZA PRİMJENU U İNTERNETU

U Vašoj tražilici unesite "Ellipta Anwendungsvideo" (Ellipta video za primjenu) i pogledajte prikaz ispravne inhalacije.



A.MENARINI PHARMA GMBH