

OVAKO FUNKCIONIŠE VAŠ INHALATOR ELLIPTA.

nastavak za usta poklopac



OTVARANJE

Otvorite inhalator tako što ćete povući poklopac nadole dok ne čujete „**klik**“. Brojač doza sada prikazuje jednu dozu manje.



INHALIRANJE

Izdahnite bez naprezanja i neka to traje što je duže moguće. Zatim usnama obuhvatite nastavak za usta – **nemojte prekrivati ventilacione otvore** – i udahnite duboko, polako i ravnomerno kroz inhalator. Zadržite dah najmanje 3-4 sekunde, a zatim izdahnite. **Važno: Nemojte izdahnuti u inhalator.**



ZATVARANJE

Vratite poklopac nazad i isperite usta vodom.

OVAKO FUNKCIONIŠE VAŠ INHALATOR ELLIPTA.

nastavak za usta poklopac



OTVARANJE

Otvorite inhalator tako što ćete povući poklopac nadole dok ne čujete „**klik**“. Brojač doza sada prikazuje jednu dozu manje.



INHALIRANJE

Izdahnite bez naprezanja i neka to traje što je duže moguće. Zatim usnama obuhvatite nastavak za usta – **nemojte prekrivati ventilacione otvore** – i udahnite duboko, polako i ravnomerno kroz inhalator. Zadržite dah najmanje 3-4 sekunde, a zatim izdahnite. **Važno: Nemojte izdahnuti u inhalator.**



ZATVARANJE

Vratite poklopac nazad i isperite usta vodom.

VİDEO NA İNTERNETU O PRİMENİ LEKA ELLİPTA

U Vaš pretraživač unesite „Ellipta Anwendungsvideo“ (Video o primeni leka Ellipta) i pogledajte prezentaciju o pravilnoj inhalaciji.



A.MENARINI PHARMA GMBH